

lifto

Εγχειρίδιο Οδηγιών



Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν την χρήση



1. Τεχνικές παράμετροι (mm): Ανοχή: ± 20 .

1) Πλάτος σώματος: 550 Μήκος βάσης: 660 Πλάτος καθίσματος: 430 Βάθος καθίσματος: 420.

2) Ύψος προϊόντος: 960-1170 Ύψος καθίσματος: 450-650 (εξαιρουμένου του μαξιλαριού καθίσματος)

3) Ασφαλές φορτίο: 120kg.

2. Συναρμολόγηση

1) Βγάλτε τη βάση, τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια και πατήστε το φρένο στους τροχούς για να ασφαλίσει. (Όπως φαίνεται στην εικόνα 1)



Εικόνα 1



Εικόνα 2

2) Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξί εξάρτημα του καθίσματος, τοποθετήστε τα στην βάση και στερεώστε τα με παξιμάδια M8. (Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, 3)



Εικόνα 3



Εικόνα 4

3) Τοποθετήστε το στήριγμα του δοχείου. (Όπως φαίνεται στην εικόνα 4)

4) Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξί κάθισμα και κλειδώστε τα με πόρτες ασφαλείας. (Όπως φαίνεται στην εικόνα 5)



Εικόνα 5

5) Τοποθετήστε την πλάτη. (Όπως φαίνεται στην εικόνα 5)

6) Τοποθετήστε τη λαβή ανύψωσης στη θέση της (Όπως φαίνεται στην εικόνα 6)

7) Τοποθετήστε το δοχείο στο στήριγμα του. (Όπως φαίνεται στην εικόνα 7)



Εικόνα 6



Εικόνα 7

3. Χρήση

1) Αφαιρέστε την πλάτη, το δοχείο και το στήριγμα του.

2) Σπρώξτε τη συσκευή στο μπροστινό μέρος του κρεβατιού και πατήστε τα φρένα (θα πρέπει να υπάρχει χώρος μεγαλύτερο από 13 cm κάτω από το κρεβάτι).

3) Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του κρεβατιού και ανοίξτε την πόρπη ασφαλείας της πλάτης.

4) Ανοίξτε το αριστερό και το δεξί κάθισμα στις 180 °, κάντε τον ασθενή να καθίσει σε όρθια θέση και σηκώστε τα πόδια του στα υποπόδια.

5) Βάλτε τον ασθενή να γέρνει ελαφρά το σώμα του προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά με τη σειρά, ενώ τοποθετήστε το αντίστοιχο κάθισμα κάτω από τον χρήστη, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάθεται στο αριστερό και στο δεξί κάθισμα με τη σειρά.

Παρατήρηση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι του καθίσματος, πρέπει να αφήσετε τον χρήστη να καθίσει πρώτα στο μαξιλάρι και στη συνέχεια να τοποθετήσετε τις 2 πλευρές κάτω από το μαξιλάρι στο οποίο κάθισε ήδη ο χρήστης.

6) Αφού ο χρήστης καθίσει πλήρως στην επιφάνεια του καθίσματος, κλείστε το κάθισμα και ασφαλίστε το με μια πόρπη ασφαλείας.

7) Σηκώστε το κάθισμα πιο ψηλά, αφήστε το φρένο, αφήστε το κρεβάτι και τοποθετήστε την πλάτη και μετά μπορείτε να μεταφερθείτε σε άλλο μέρος.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

1) Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε εάν όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και εάν η εγκατάσταση είναι σταθερή για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση.

2) Πριν από τη χρήση, ρυθμίστε το κάθισμα στο κατάλληλο ύψος και βεβαιωθείτε ότι το αριστερό και το δεξί ύψος καθίσματος παραμένουν σταθερά.

3) Όταν ο χρήστης κάθεται ή αφήνει το κάθισμα, μην στέκεστε στο πεντάλ του ποδιού. Το πεντάλ του ποδιού πρέπει να διπλωθεί και ο χρήστης πρέπει να σταθεί πρώτα στο έδαφος, διαφορετικά είναι εύκολο να ανατραπεί. Ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι κλειδωμένοι με το φρένο.

4) Κατά τη μεταφορά του χρήστη, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι καλά στερεωμένο. Εάν υπάρχει ζώνη ασφαλείας, πρέπει να είναι κλειδωμένη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

5) Όταν χρησιμοποιεί τη συσκευή, ο χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει να σηκώνει ή να ανακτά αντικείμενα έξω από τη συσκευή για να αποτρέψει το σώμα του να ανατραπεί λόγω υπερβολικής κλίσης.

6) Πριν ρυθμίσετε το ύψος, πρέπει να πατήσετε τα φρένα. Η αριστερή και η δεξιά λαβή πρέπει να ανακινούνται συγχρονισμένα και ομοιόμορφα.

7) Μην βασίζεστε στην αδράνεια για να ωθήσετε τον εξοπλισμό προς τα πάνω, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή ζημιές. Όταν ανεβαίνετε και κατεβαίνετε σκάλες, ο χειριστής δεν μπορεί να μετακινήσει τον χρήστη μαζί με τον εξοπλισμό, διαφορετικά θα αποτελέσει κίνδυνο για τον χρήστη .

8) Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε επίπεδες επιφάνειες και πρέπει να δίνεται προσοχή στην αποφυγή λακκούβων και εμποδίων για την αποφυγή ανατροπής.

9) Όταν η κλίση κατωφέρειας είναι μεγαλύτερη από 5 °, ο χειριστής θα πρέπει να γυρίσει τον εξοπλισμό και να επιστρέψει το μοχλό ταχυτήτων αργά στην κλίση. Εάν ο εξοπλισμός κινείται προς τα εμπρός κατά την κατηφόρα, υπάρχει κίνδυνος οι ασθενείς να γέρνουν προς τα εμπρός και να πέσουν.

10) Όταν σταματάτε στο έδαφος, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί έχουν φρενάρι.

11) Τα φρένα των τροχών χρησιμοποιούνται για στάθμευση και όχι για επιβράδυνση κατά τη διάρκεια της κίνησης.

12) Όταν το βάρος του ασθενούς υπερβαίνει τα 120 κιλά, θα πρέπει να διακόπτεται για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού.

13) Κατά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων αυτού του προϊόντος, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τα αντίστοιχα αξεσουάρ της εταιρείας μας για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκαλείται από αναντιστοιχίες.

8. Μέθοδοι συντήρησης

1) Μη διαβρωτικά ουδέτερα καθαριστικά ή απολυμαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό ή την απολύμανση της επιφάνειας της καρέκλας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αλκοόλης για το σκούπισμα του εξοπλισμού για την αποφυγή διάβρωσης της επίστρωσης.

2) Μην γρατσουνίζετε την επιφάνεια του εξοπλισμού με σκληρά αντικείμενα για να αποφύγετε υλικές ζημιές.

3) Ελέγχετε τακτικά για χαλαρά παξιμάδια και βίδες ή κατεστραμμένα μέρη.

9. Αποθήκευση

Πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια και καλό αερισμό.

Η περίοδος εγγύησης αυτού του προϊόντος είναι ένα έτος (εξαιρουμένων των ευάλωτων εξαρτημάτων) και το εύρος της εγγύησης περιορίζεται μόνο στην κανονική χρήση.